


Ihr Fachhändler:

Bedienungsanleitung

 **Lehmann**
Rollstuhlrampen & Hebelifte

Teleskoprampen, zweiteilig

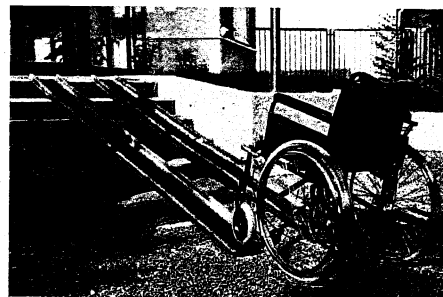

Lehmann

Schützenplatz 5A
D-28790 Schwanewede

Tel: 0421 241050
Fax: 0421 2410515


E-Mail: info@rollstuhlrampen.de
Internet: www.rollstuhlrampen.de
oder www.hebelifte.de

AUFBAU DER TELESKOPRAMPEN


- Stellen Sie die erste Teleskoprampe so vor sich auf, dass sich die Trageschlaufe auf der rechten Seite befindet. Um ein unkontolliertes auseinanderrutschen zu vermeiden achten Sie unbedingt darauf, dass die Rampe fest auf dem Boden steht!
- Lösen Sie den Arretierclip durch ziehen an der Lasche und ziehen die beiden Rampenteile auseinander.
- Legen Sie die Rampe auf den Boden bzw. auf die Stufe. Achten Sie darauf, dass die Rampe kippstabil aufliegt.
- Achten Sie darauf, dass die gummierte Auflage komplett auf der Stufe aufliegt.
- Wiederholen Sie die Schritte für die zweite Rampe.
- Positionieren Sie die Rampen parallel zueinander, entsprechend dem Abstand der Rollstuhlräder.

BENUTZUNG DER RAMPEN

- Achten Sie darauf, dass die Räder in der Mitte der jeweiligen Rampe laufen.
- Ab einer Steigung von 6% sollte die Rampe nur in Begleitung einer Hilfsperson benutzt werden.
- Rollstuhlfahrer müssen bei der Benutzung der Rampe einen Sicherheitsgurt anlegen.
- Beachten Sie unbedingt die maximale Belastung. Diese Angabe befindet auf einem Hinweisschild an der Rampe. Achtung: Das Gewicht aller sich auf der Rampe befindenden Personen und Gegenstände muss berücksichtigt werden.

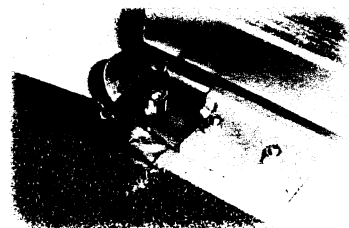

Arretierclip

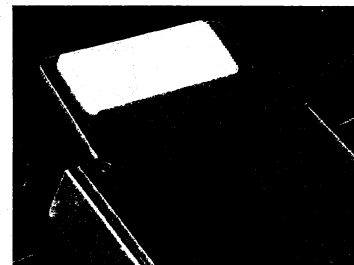

gummierte Auflage

ABBAU DER RAMPEN

- Schieben Sie die Rampe zusammen, bis der Arretierclip hörbar einrastet und das Blech den Pin des Arretierclip umschließt.
- Verfahren Sie ebenso mit der zweiten Rampe.

GEFAHRENHINWEIS

- **ACHTUNG:** wenn die Arretierung gelöst ist rutschen die Rampen sehr leicht auseinander. Um ein unkontolliertes auseinanderrutschen zu vermeiden achten Sie also unbedingt darauf, dass die Rampe fest auf dem Boden steht!
- Kontrollieren Sie vor der Benutzung, ob die beiden Rampen parallel zueinander liegen und der Abstand entsprechend dem Abstand der Rollstuhlräder eingestellt ist.
- Beachten Sie, dass sich bei Nässe die Rutschhemmung der Rampenoberfläche verringert. Es besteht Rutschgefahr. Befahren bzw. begehen Sie die Rampe daher mit entsprechender Vorsicht!
- Rampen sollten bei Aussentemperaturen um 0° C vor der Benutzung auf Eisbildung kontrolliert werden!
- Tragen Sie in jedem Fall festes, rutschesicheres Schuhwerk.

WARTUNG UND PFLEGE

- Die Lauffläche der Rampe sollte regelmäßig von Verschmutzung durch z.B. Laub und Sand gereinigt werden.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel oder auch einfach mit Wasser. Benutzen dabei keine harten Bürsten oder andere harte Gegenstände wie z.B. Stahlwolle. Dies würde die Oxydschicht zerstören.
- Um ein gegenseitiges Verschrammen beim Transport der Rampen zu vermeiden, sollten Sie ein Stück Pappe oder ein Tuch zwischen die beiden Rampen legen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rampe auf Risse oder Ausbeulungen. Sollte Sie eine Beschädigung feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler.